



# Scrubby

Silla de ruedas  
eléctrica basculante

**MANUAL DE USUARIO**

Ref. SEFALSCRUBBY

más de 50 años viviendo sin límites

**!** Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DESDE TOTALCARE EUROPE

# LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva silla de ruedas eléctrica **Scrubby**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

<b>1 – Partes de la silla eléctrica .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – Descripción del producto .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – Características del producto .....</b>	<b>5</b>
<b>4 – Antes de empezar.....</b>	<b>7</b>
<b>5 – Uso y montaje .....</b>	<b>8</b>
<b>6 – Batería .....</b>	<b>11</b>
<b>7 – Mantenimiento y limpieza.....</b>	<b>12</b>
<b>8 – Garantía .....</b>	<b>14</b>

## 1. PARTES DE LA SILLA ELÉCTRICA



## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA INFANTIL CON BASCULACIÓN ELÉCTRICA AJUSTABLE

La silla Scrubby es una silla eléctrica infantil basculante con chasis de aluminio. Cuenta con un juego completo de luces, sistema de amortiguación y joystick ajustable. El asiento es regulable en anchura de 30 a 35 cm o de 35 a 40 cm y también en profundidad.

Los reposapiés son ajustables en largo y ángulo. Por otro lado, cuenta con reposabrazos ajustables en altura. Incluye un reposacabezas y el respaldo es plegable y reclinable. Además es basculante eléctricamente trasera con una potencia de 420W cada uno.

### 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



SCRUBBY

#### INFORMACIÓN GENERAL

##### Medidas

Ancho total	58 cm
Profundidad total	100 cm
Alto total	104 cm
Alto del asiento al suelo	56 cm

##### Peso

Peso total	83 kg
Peso máximo soportado	80 kg

<b>Material</b>	Aluminio	<b>Color</b>	Verde
-----------------	----------	--------------	-------

##### Asiento

Ancho del asiento (regulable)	30 a 35 cm / 35 a 40 cm
Profundidad del asiento	42 cm
Tipo de asiento	Regulable en ancho
Material del asiento	Acolchado de tela ignífuga transpirable

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	8,5 cm
Largo del reposabrazos	26,5 cm
Material del reposabrazos	Inyectado
Tipo de reposabrazos	Fijos

### Reposapiés

Tipo de reposapiés	Individuales y elevables
Material del reposapiés	Plástico y aluminio

### Respaldo

Ancho del respaldo	31 cm
Alto del respaldo	52 cm
Tipo de respaldo	Reclinable
Material del respaldo	Acolchado transpirable

### Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 22 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 34 cm
Ancho ruedas delanteras	6 cm
Ancho ruedas traseras	8 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables

### Motor

Potencia motor	2 x 300 W
Batería	2 x 50 Ah (gel)
Número de baterías	2
Velocidad máxima	12 km/h
Autonomía	20 - 25 km
Cargador externo	5 Ah

### Otras características

Basculación	Eléctrica
Cinturón de seguridad	Sí
Claxon	Sí
Luces delanteras y traseras	Sí
Luces intermitentes y señal de emergencia	Sí
Frenos	Electromagnéticos
Joystick	Programable
Marcha atrás	Sí
Reposacabezas	Si (De serie)
Ruedas antivuelco	Sí



Basculación eléctrica



Reposabrazos regulable



Reposapiés de la Scrubby

## 4. ANTES DE EMPEZAR

### 4.1. PRÁCTICA ANTES DE EMPEZAR

- Antes de conducir el vehículo en el día a día, debe encontrar un espacio abierto, como un parque, para practicar las maniobras.
- Recomendamos que cuando practique la conducción debería ir acompañado de alguien que le ayude.
- Siempre asegúrese que el vehículo está apagado antes de subirse o bajarse del mismo. Siempre compruebe que la velocidad seleccionada es acorde a su experiencia y habilidades.
- Mientras practique, mantenga la velocidad en la posición más lenta.

Para una conducción segura, asegúrese que está familiarizado con las características del vehículo y los modos de conducción del mismo.



Primero, practique moviéndose hacia delante. Asegúrese que la velocidad está configurada en la posición más lenta.



Practique los giros en "s" para familiarizarse con su silla de ruedas eléctrica. Realice esta acción las veces que considere oportunas.



Finalmente, practique la conducción marcha atrás. Por favor, tenga en cuenta que cuando conduzca marcha atrás el vehículo siempre se mueve más lento, independientemente de a la velocidad configurada.

### 4.2. SEGURIDAD DEL USUARIO

- No lleve pasajeros.
- No conduzca después de beber alcohol.
- Consulte con su médico si su medicación interfiere con sus habilidades para conducir.
- No use mientras conduce ningún dispositivo de comunicación como: teléfonos móviles, Radios CB, etc.
- No enganche ningún remolque.
- No conduzca cruzando ninguna cuesta.

### 4.3. CONDUCIR EN EL EXTERIOR

- La silla de ruedas no está diseñada para moverse por carretera.
- No use la silla de ruedas durante la lluvia o nevadas, cuando la temperatura sea superior a 30°C o más baja 0°C.
- No use la silla de ruedas en superficies blandas, irregulares, o desprotegidas como hierba, graba, arena o cubiertas, al lado de ríos o lagos.
- Si es posible, no use la silla de ruedas en el exterior por la noche.
- Asegúrese de que no hay obstáculos detrás de usted cuando conduzca marcha atrás. También recomendamos programar la velocidad en la posición más lenta.
- No pare bruscamente, intente siempre parar suavemente.
- Siempre mantenga sus brazos en el reposabrazos y sus pies en los reposapiés cuando conduzca.
- No intente subir bordillos más altos de 7cm.
- No conduzca por agujeros/huecos más hondos de 10cm.

### 4.4. CONDUCIR POR CUESTAS Y TERRENOS DESIGUALES


Conducir por colinas y otros terrenos irregulares es más peligroso que conducir por superficies planas. Seguir las siguientes normas es esencial para evitar accidentes y lesiones graves.


- No intente subir por cuestas cuya pendiente exceda 10°.
- No se mueva marcha atrás mientras suba/baje una cuesta.
- No use la silla de ruedas en superficies blandas, irregulares, o desprotegidas como hierba, graba, arena o cubiertas, al lado de ríos o lagos.
- No encienda ni apague la silla de ruedas si está situado en una pendiente (Para encender o apagar la silla de rueda es necesario estar en una superficie plana).
- Siempre suba o descienda la cuesta perpendicular a la pendiente.

## 5. USO Y MONTAJE

### 5.1. USO DEL PANEL DE CONTROL

**Joystick:** El Joystick permite el control de la dirección y la velocidad del movimiento. Empuje el joystick hacia delante para liberar el freno electromagnético y poner la silla de ruedas en marcha. Cuanto más empuje el joystick hacia delante, más rápido se moverá la silla. Si suelta el joystick, la silla disminuirá la velocidad y parará

 **Modo ajuste de silla:** El joystick permite ajustar la posición del asiento. Mueva el joystick para atrás para reclinar el asiento y empújalo para elevarlo.

 **Modo conducir:** El Joystick te permite controlar y maniobrar la silla de ruedas. Empuje el joystick hacia delante para avanzar en línea recta. Mueva el joystick hacia atrás para conducir marcha atrás. Con el fin de girar a la izquierda y la derecha, mueva el joystick hacia el lado que quiera girar. Si desea parar suelte el joystick.

**Barra estatus de la batería:** Puede encontrar la barra del estado de la batería en la parte superior del control. Usando los indicadores luminosos, la barra de estado de la batería proporciona información del suministro, de la eficiencia aproximada de las baterías y de los sistemas eléctricos de la silla de ruedas.


Las luces roja, amarilla y verde encendidas indican que la batería está totalmente cargada, que el sistema eléctrico y el sistema de control electrónico son eficientes.


Las luces rojas y amarillas encendidas indican que debería cargar la batería, el sistema eléctrico y el sistema de control electrónico son eficientes.

Si solo está encendida la luz roja o hay un parpadeo de la misma, deber cargar las baterías lo antes posible, el sistema electrónico y el sistema de control eléctrico son eficientes.

Si las luces parpadean, el sistema electrónico y el sistema de control eléctrico no están funcionando adecuadamente. Si el aviso luminoso parpadea 6 veces el motor izquierdo no funciona correctamente. Si el aviso luminoso parpadea 5 veces el motor derecho no funciona correctamente.

Si el aviso luminoso parpadea constantemente, el joystick no estaba en una posición neutral cuando apagó la silla de ruedas. Apague la silla de ruedas, coloque el joystick y encienda de nuevo.


 Si usted ha seguido el manual de instrucciones del usuario, pero las luces de aviso siguen parpadeando, por favor, contacte con el distribuidor.


 **Botones ajuste de velocidad:** Hay dos botones para ajustar la velocidad – Si usted quiere disminuir la velocidad apriete el botón desacelerador. La velocidad actual se puede ver en el indicador situado debajo de la barra de estatus de la batería. Como más rápido se mueva, más luces encendidas. Cuando use la silla por primera vez, se recomienda elegir velocidad más lenta posible.

 **Botón bocina:** Apriete el botón para activar la bocina.

**Toma de corriente para cargar:** La toma de batería se usa para cargar – enchúfelo a la toma de corriente (máx. 12A).

**Luces de conducción:** Cuando encienda las luces de conducción, el icono correspondiente de las luces de conducción se activará.

 **Botón de señal de giro a la izquierda:** Cuando apriete el botón, el icono correspondiente se activará. Para apagar la luz de aviso, vuelva a apretar el botón.

 **Botón de señal de giro a la derecha:** Cuando apriete el botón, el icono correspondiente se activará. Para apagar la luz de aviso, vuelva a apretar el botón.

 **Botón luz de posición:** Activa las luces de posición.



## 5.2. USO DE LA CARGA DE LA SILLA

Conecte el cable de salida del cargador a la toma de carga en la parte inferior del controlador.

Después de conectar el cable de salida del cargador a la toma de carga y a la toma de corriente, encienda el panel de control electrónico.


La silla de ruedas no se moverá mientras se cargue aún que empuje el joystick.



**Interruptor de encendido:** "–" botón **APAGADO** y "0" botón **ENCENDIDO**.


Para encender el cargador, presione el botón para cambiarlo a la posición "0".

- **Luz naranja:** carga en proceso.
- **Luz amarilla:** carga completada, las baterías están totalmente cargadas.

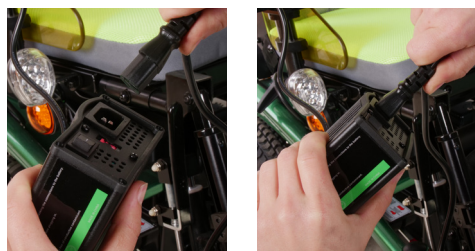

## 5.3. USO DEL MODO AJUSTE DE LA SILLA DE RUEDAS

En primer lugar, seleccione el modo ajuste en el control. Apriete el botón "modo" en el control y elija el modo ajuste.

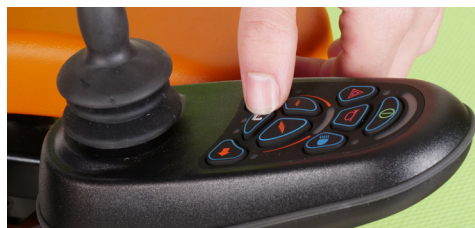

Por favor, mire al icono de la silla de ruedas situado en el control- este indicará que parte de la silla de ruedas (reposabrazos, asiento, o reposapiés) está listo para ser ajustado. Mueva el joystick hacia la derecha o la izquierda para cambiar la parte de la silla de ruedas que quiere ajustar. Una vez este seleccionada la parte que desea modificar, el indicador luminoso pertinente se iluminará para mostrarle que parte de la silla de ruedas será ajustada. Cuando presione el joystick hacia delante, la parte seleccionada se elevará. Cuando mueva el joystick para atrás la parte seleccionada bajará.



Cuando haya realizado todos los ajustes, apriete el botón "modo" nuevamente para pasar a modo conducción.

**Ajuste de control:** Es posible ajustar la posición del control a sus necesidades individuales. Afloje el tornillo de liberación rápida situado debajo del reposabrazos y seleccione la posición del antebrazo requerida. Entonces atornille el tornillo. El control debería situarse a la derecha o izquierda del reposabrazos. Así mismo puede situarse en la parte posterior de la silla de ruedas para ser usado por un cuidador.



## 5.4. USO DEL REPOSABRAZOS

Con el fin de ajustar la altura del reposabrazos, afloje el tornillo ajustable a mano, seleccione la altura idónea y apriete de nuevo el tornillo.



## 5.5. USO DE LA INCLINACIÓN DEL RESPALDO

Tire de la correa de reclinación situada en la parte posterior, detrás del respaldo.

Quite los pernos de agujeros, elija el ángulo deseado y coloque los pernos nuevamente en los agujeros que correspondan al ángulo deseado.



## 5.6. USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Los cinturones de seguridad protegerán al usuario cuando conduzca la silla de ruedas. Recuerde siempre abrocharse los cinturones de seguridad antes de encender la silla de ruedas.



## 5.7. USO DE LAS RUEDAS ANTIVUELCO


Las ruedas antivuelco protegen a la silla de ruedas de caídas en caso de ligeras inclinaciones laterales, proporcionando estabilidad. Es posible plegar o desplegar las ruedas antivuelco tal y como se muestra en las imágenes.



## 5.8. USO DEL EMBRAGUE DEL MOTOR

Si desea empujar la silla de ruedas eléctrica, tire de la palanca del embrague para liberar el pasador de bloqueo de bola (el pasador de bloqueo de bola se inclinará hacia abajo).

Conducción automática: tire del pasador de bloqueo de bola para soltar la palanca del embrague (la palanca del embrague se inclinará hacia abajo y activar el accionamiento eléctrico).

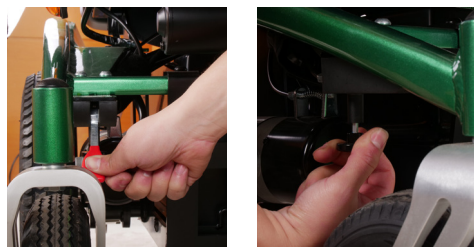

**⚠** Por favor, recuerde que cuando apaga el Sistema eléctrico esta apagado, los frenos electromagnéticos también están desconectados.


*Nunca apague la conducción electromagnética si no hay una persona que pueda empujarle la silla.*

*Nunca apague la conducción electromagnética si está situado en una pendiente o un terreno inclinado - La silla de ruedas podría ir cuesta abajo lo que podría provocar daños en la silla de ruedas o lesiones graves.*

## 6. BATERÍA

### 6.1. EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

Con el fin de retirar las baterías afloje el tornillo de la cabeza semi hueca y extraiga la bandeja de la batería.

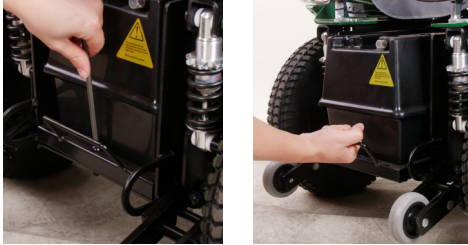

### 6.2. INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La silla de ruedas está equipada con dos baterías de 12V que no requieren mantenimiento.

Con el fin de obtener la máxima eficacia en sus baterías por favor siga las siguientes instrucciones:

- Cargue cada batería antes del primer uso. Las baterías alcanzarán el 90 % de su capacidad.
- Use la silla eléctrica desplazándose lentamente no muy lejos del lugar donde pueda volver a cargar las baterías hasta que las baterías se descarguen por completo. Luego cárguelas nuevamente durante 9-10 horas.
- Después de cuatro o cinco ciclos de carga las baterías deberían alcanzar el 100% de su capacidad y durar mucho tiempo al 100% de su capacidad.
- Las baterías están equipadas con un conector de sobrecarga (50AH) que automáticamente desconecta la carga cuando la corriente excede de un valor determinado.



**⚠** Nunca deje que las baterías se descarguen completamente. Si usted visualiza la última luz amarilla o la primera de las rojas en el indicador del control cargue las baterías. Recuerde que el ciclo de carga debería durar entre 9 y 10 horas hasta que las baterías están completamente cargadas.

Nunca pare o suspenda la carga de las baterías si no están totalmente cargadas. No seguir las anteriores normas pueden conducir a daños en la batería.

Si usted almacena las baterías, asegúrese que están completamente cargadas.

Si no usa la silla de ruedas regularmente, debería cargar las baterías al menos cada dos semanas. Recuerde que cada carga debe ser completa hasta que las baterías estén completamente cargadas.

Si usted nota alguna fuga o Pérdida de la batería, por favor contacte con el distribuidor.

Cuando cargue las baterías, siempre mantenga la silla de ruedas y el cargador lejos de cualquier fuente de calor.

**Batería y carga:** El cargador es una pieza clave de la silla de ruedas. Para cargar las baterías rápidamente y de manera segura, use solo el cargador original suministrado con la silla de ruedas y siga las instrucciones.

Siempre conecte el cargador en el enchufe del cargador situado en la parte inferior del control.

Siga las instrucciones descritas en el cargador.

El tiempo de carga depende del estado de las baterías. La mejor opción es cargar las baterías por la noche – cuando las baterías estén cargadas el cargador dejará de funcionar automáticamente.

Cuando la carga es completa, retire el cargador de la toma de corriente y luego del enchufe de carga. Nunca deje el cargador conectado a la toma de cargador sin estar conectado la toma de corriente.

Si necesita reemplazar las baterías, por favor, contacte con su distribuidor.

## 7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Con el fin de garantizar que su silla de ruedas le proporcione años de funcionamiento sin problemas, el usuario deberá regularmente inspeccionar y mantener la silla de ruedas y llevarla a un distribuidor autorizado para un mantenimiento e inspección. Si usted se encuentra con problemas o anomalías mientras usa la silla de ruedas, por favor, contacte con el punto de servicio autorizado más cercano.

### 7.1. INSPECCIÓN ANUAL

La inspección anual permite comprobar si la silla de ruedas está en buen estado y si todos los sistemas (Sistema de conducción, Sistemas eléctrico y electrónico) funcionan adecuadamente. Además, le ayudará a prevenir posibles problemas que pueden provenir de defectos existentes. La inspección debería incluir:

1. Inspección del neumático.
2. Inspección de la batería y el cableado.
3. Inspección del programa de control del controlador y verificación si requiere reedición.
4. Inspección de la estructura principal.
5. Inspección del respaldo y los cojines del asiento.

### 7.2. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - NORMAS GENERALES

1. Proteja el control y el joystick de sacudidas y golpes violentos.
2. Evite largas exposiciones de la silla eléctrica a frío, calor o humedad extremas.
3. Mantenga siempre el joystick y el control limpios.
4. Mantenga la silla de ruedas lejos del contacto directo con el agua.
5. Mantenga siempre la estructura y tapizados limpios. Use un paño suave y seco para limpiar el marco principal y la tapicería. No utilice ningún abrasivo. Durante la limpieza, no utilice detergentes directamente sobre el controlador, el cargador de batería u otros conectores de alimentación.

6. Lubrique ligeramente el pasador del eje, el eje de la rueda y los cojinetes cada tres meses.
7. Use solo las baterías originales suministradas con la silla de ruedas. Si quiere reemplazar las baterías contacte con su distribuidor.
8. Cargue regularmente las baterías. Asegúrese siempre de que el cargador está debidamente conectado a la salida de corriente. Nunca desenchufe el cargador tirando del cable.
9. Inspeccione regularmente las condiciones del Joystick – Apague la alimentación y compruebe que el joystick no está dañado. Intente empujar el joystick y luego y luego suéltelo; debería volver automáticamente a su posición neutral central. Revise la funda de goma alrededor de la base de la palanca de mando para ver si está dañada. Inspeccione visualmente la bota. No lo manipule ni intente repararlo. Consulte al distribuidor autorizado si hay algún problema.
10. Revise cuidadosamente todos los cables; si nota algún daño, comuníquese con el punto de servicio autorizado. Asegúrese de que todas las conexiones de cableado sean correctas y adecuadas.
11. Asegúrese de que todas las partes del sistema de control estén bien sujetas a su silla de ruedas eléctrica. No apriete demasiado los tornillos.

## 8. ALMACENAMIENTO DE LA SILLA

Su silla de ruedas eléctrica debe almacenarse en un lugar seco y libre de temperaturas extremas. Al almacenar, desconecte las baterías de la silla eléctrica, consulte "Baterías y carga" en este manual. Si no almacena la unidad en las condiciones anteriores, el marco puede oxidarse y los componentes electrónicos pueden dañarse.

### 8.1. LISTA POSIBLES PROBLEMAS

**Problema:** Las luces del control parpadean rápidamente cuando se enciende.

**Acción:** Apague la silla de ruedas, situ el joystick en posición neutral. Espere unos segundos y reactive la silla.

**Problema:** Las luces del control destellan lentamente cuando se conduce.

**Acción:** Los destellos lentos significan que los niveles de carga de la batería son bajos y que deben ser cargadas lo antes posible.

**Problema:** Las luces del control destellan continuamente y no es posible controlar la silla de ruedas.

**Acción:** El destello continuo del control significa que hay algún problema eléctrico. Apagúe la silla de ruedas y contacte con su punto de servicio autorizado.

**Problema:** La luz roja del control de la carga de la batería no se enciende durante la carga de la batería.

**Acción:** Compruebe que todos los cables están debidamente conectados y enchufados a la toma de corriente. Si la luz roja del control sigue sin iluminarse, desconecte el cargador de la batería de la toma de corriente y del panel de control, apague la silla de ruedas y contacte con un punto de servicio.

**Problema:** La silla es difícil de dirigir.

**Acción:** Primero, compruebe que las ruedas están debidamente instaladas a en la silla de ruedas. Segundo compruebe que la palanca del embrague está conectada correctamente.

**NOTA:** Si usted detecta que hay problemas en los motores, en el cargador de la batería, en el control o la estructura de la silla de ruedas, le recomendamos que contacte el punto autorizado más cercano.

Si usted nota algún otro aspecto irregular en su silla o fallo para responder después de realizar alguna de las inspecciones anteriormente mencionadas, llame a su punto de servicio autorizado más cercano.

## 8. GARANTÍA

### DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

### LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

**NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.**

**CONTACTE CON SU PROVEEDOR.**

## SCRUBBY

Los reposapiés son ajustables en largo y ángulo. Por otro lado, cuenta con reposabrazos ajustables en altura. Incluye un reposacabezas y el respaldo es plegable y reclinable.



## Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.



Producto sanitario conforme con el MDR.

## Manual de usuario

Silla de ruedas eléctrica basculante Scrubby

V1 · 20/12/2022